



Kallocryl®

Prothesenkunststoff Kaltpolymerisat

CE 0482

EN ISO 20795-1, Typ 2, Klasse 1

Zusammensetzung:

Pulver enthält Polymethylmethacrylat, Benzoylperoxid, Farbstoff (cadmiumfrei, Typ Af ohne Farbstoff).
Flüssigkeit enthält Methylmethacrylat, NN-Dimethyl-p-toluidin, UV-Absorber, Aroma.

Anwendungsgebiete:

- Für die Herstellung von Voll- und Teilprothesen
- Für die Reparatur von Prothesen und orthodontischen Geräten
- Für kieferchirurgische Zwecke

Gegenanzeigen:

- Bei direkten Unterfütterungen
- Bei Kontakt von unpolymerisiertem Material mit der Mundschleimhaut
- Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe

Nebenwirkungen/Wechselwirkungen:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine bekannt.

Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:

Empfohlen wird ein Mischungsverhältnis von zwei Teilen Pulver und einem Teil Flüssigkeit. Das Mischungsverhältnis Pulver zu Flüssigkeit kann geringfügig variiert werden. Es wird zuerst die Flüssigkeit in ein Anmischgefäß eingefüllt und dann Pulver eingestreut und mittels eines Spatels vermengt. Beim Mischen sind Luftblasen zu vermeiden. Der Teig wird innerhalb von 3 Minuten in den Hohlraum eingebracht. Die Arbeit wird dann in einen Drucktopf gegeben und mit mindestens 2 bar Druck beaufschlagt. Nach ca. 25 Minuten ist das Kaltpolymerisat ausgehärtet und kann ausgearbeitet werden.

Hinweise:

Flüssigkeit darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Kleinere Mengen des Pulvers können gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Pulverdose nach Gebrauch gut verschließen. Vor Feuchtigkeit schützen. Flüssigkeit nach Gebrauch sofort verschließen und nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.

Lagerung bei Raumtemperatur.

Kallocryl® Kaltpolymerisat darf nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.

Bitte beachten Sie die Gefahren- und Sicherheitshinweise auf dem Etikett!

Handelsformen:

Kallocryl® A	Farbe hellrosa	Inhalt: 500 g	Art.-Nr. 1600
Kallocryl® A I	Farbe rosa bräunlich	Inhalt: 500 g	Art.-Nr. 1603
Kallocryl® A II	Farbe rosa	Inhalt: 500 g	Art.-Nr. 1606
Kallocryl® Af	Farblos	Inhalt: 500 g	Art.-Nr. 1609
Kallocryl® C	Farbe rosa, schnellhärtend	Inhalt: 500 g	Art.-Nr. 1612
Kallocryl® A/C		Inhalt: 80 ml	Art.-Nr. 1616
Kallocryl® A/C		Inhalt: 250 ml	Art.-Nr. 1615
Kallocryl® A/C		Inhalt: 1000 ml	Art.-Nr. 1614

Stand der Information: Januar 2017