



CE **SPEIKOPLAQUE /
SPEIKOPLAQUE 3% / SPEIKOPLAQUE DUO**
Flüssigkeiten zur Plaqueerkennung

Zusammensetzung:

SPEIKOPLAQUE und SPEIKOPLAQUE 3% enthalten Erythrosin (E 127), Demineralisiertes Wasser.
SPEIKOPLAQUE DUO enthält Patentblau (E131), Phloxin B, Demineralisiertes Wasser.

Anwendungsgebiete:

Indikatorflüssigkeiten zur Visualisierung von Zahnbelag (Plaque) auf Zahnoberflächen. Nach Aufbringen von SPEIKOPLAQUE und SPEIKOPLAQUE 3% färbt sich der Belag mehr oder weniger rot, wobei SPEIKOPLAQUE 3% intensiver färbt. Nach Aufbringen von SPEIKOPLAQUE DUO färben sich ältere Beläge blau, jüngere Beläge rot.

Gegenanzeigen:

Allergie gegen Erythrosin, Iod und Sonnenlicht (Fotodermatose).
Hyperkinetisches Syndrom bei Kindern (nur bei SPEIKOPLAQUE und SPEIKOPLAQUE 3%).
Kinder unter sechs Jahren (nur bei SPEIKOPLAQUE und SPEIKOPLAQUE 3%).

Nebenwirkungen/Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Dosieranleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Einige Tropfen der Indikatorflüssigkeit in ein Dappenglas geben. Mit dem Pinsel oder einem Wattepellet die Flüssigkeit aufnehmen und auf die zu prüfenden Zahnoberflächen aufbringen. Vorhandener Belag wird durch Rotfärbung (SPEIKOPLAQUE DUO auch blau) sofort sichtbar. Entfernung der Färbung durch Spülen mit Wasser und Putzen der Zähne.

Hinweise:

Das Medizinprodukt darf nach Ablauf des Verwendbarkeitsdatums nicht mehr angewendet werden.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Handelsform:

Flüssigkeit SPEIKOPLAQUE	Inhalt: 20 ml	Bestell-Nr. 1052
Flüssigkeit SPEIKOPLAQUE 3%	Inhalt: 20 ml	Bestell-Nr. 1075
Flüssigkeit SPEIKOPLAQUE DUO	Inhalt: 20 ml	Bestell-Nr. 1054