



## Winkelklammern SPEIKO® einarmig links, Gr. 1, einarmig rechts Gr. 2

### Zusammensetzung:

Edelstahl (Typ 1.4301), enthält Nickel, Stärke 1 mm Ø

### Anwendungsgebiete:

- Für die Herstellung von einarmigen Halteelementen an Teilprothesen
- Für die Reparatur/Erweiterung von einarmigen Halteelementen an Teilprothesen

### Gegenanzeigen:

- Bei Verarbeitung auf Materialpaarung achten, ungünstige Metallpaarungen können zu Korrosion bzw. zu Metallverfärbungen führen.
- Bei Allergien auf Metalle

### Nebenwirkungen/Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine bekannt.

### Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:

Der spitze Winkel der vorgefertigten Winkelklammer wird approximal zwischen natürlichem Zahn und Prothesensattel/Prothesenzahn angelegt. Ein Ende wird an den natürlichen Zahn angebogen, das andere freie Ende wird so gebogen, dass es im Prothesensattel verwindungsfest befestigt/eingegossen werden kann.

Durch das Verarbeiten der Klammer mit entsprechenden Zangen können scharfe Kanten entstehen. Diese scharfen Kanten müssen entgratet, gerundet werden. Für die thermische Be-, Verarbeitung ist jegliche Haftung des Halteelementes ausgeschlossen.

### Hinweise:

Vor der Eingliederung der kompletten Arbeit beim Patienten ist diese optisch auf einwandfreien Zustand zu prüfen, sonst besteht Verletzungsgefahr beim Zahnarzt, Zahntechniker und/oder Patienten mit entsprechender Infektionsgefahr.

### Handelsformen:

Winkelklammern SPEIKO®, einarmig links, Gr. 1	Inhalt: 10 Stück	Art.-Nr. 1804 (HEKO Nr. 5521.0001)
Winkelklammern SPEIKO®, einarmig rechts, Gr. 2	Inhalt: 10 Stück	Art.-Nr. 1805 (HEKO Nr. 5521.0002)

Stand der Information: Januar 2018